

Jeg vil gerne vide mere:

Ring mig op


Ønsker en demonstration på klinikken

Forhandler:

Kunde:

Svarkort

DENTCALL - KALDEANLÆG

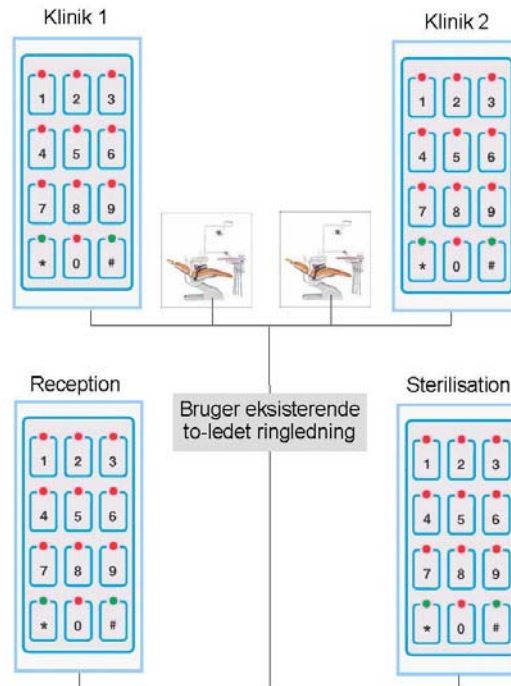

Producent:


DENT
Vestre Hovedgade 6C
DK - 7560 Hjerm
Danmark

Telefon: +45 70 22 99 44
Fax: +45 97 70 70 03
E-mail: mail@dentcall.dk

DENTCALL er patent. 2009

DENTCALL

Kaldeanlæg
til tandklinikken

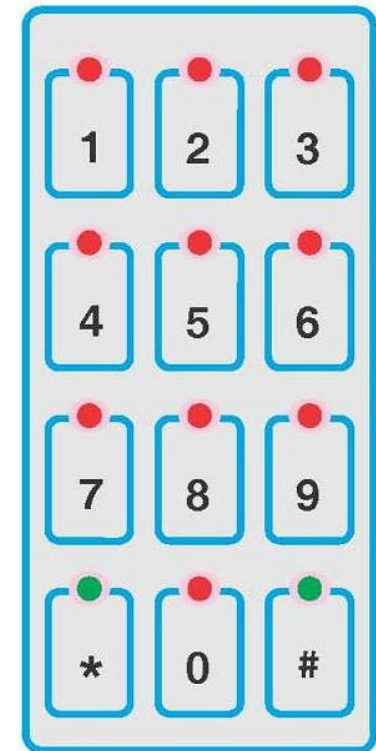

DENTCALL Dansk version 1.1

Nyt kaldeanlæg . .

Du kender sikkert de kaldeanlæg der betjenes med en ringeknap eller via fodkontrollen. Disse anlæg virker typisk ved at man trykke et antal gange svarende til kliniknummeret man er på. Ringelydene kan virke forstyrende på de andre klinikrum. Efter at have ringet, venter man, uden at vide om nogen har hørt kaldet . .

Med DENTCALL er der nu helt nye muligheder for kommunikation på klinikken mellem medarbejderne.

DENTCALL anlægget kan bestå af flere betjeningspaneler med lamper som typisk monteres på de enkelte klinikrum tilsluttet ringeknappen på unitten.

Der kan også monteres betjeningspaneler i sterilisationen, personale-rummet samt receptionen.

DENTCALL anlægget kan bruge de gamle ringeledninger der er tilsluttet unitterne og ringeknapper.

Anlægget forsynes fra en fast strømforsyning, tilsluttet ringeledningen , så ingen batterier der skal skiftes . .

Sådan virker det . .

Tandlægen arbejder på klinik 2 :

Tandlægen trykker på ringeknappen.

Der lyde nu et bip i panelerne og lampen svarende til klinikkens nr. begynder at blinke i alle panelerne.

Klinikassistenten der lige nu arbejder i sterilisation:

På panelet i sterilisationen trykker klinikassistenten på tallet 2 , lampen går fra at blinke til at lyse konstant. Tandlægen på klinikken kan nu se på sit panel, at klinikassistenten har set opkaldet.

Klinikassistenten går til klinik 2 :

Når klinikassistenten er færdig på klinikken trykkes på 2 eller på unittens ringeknap. Lampe 2 skifter fra at lyse konstant til at være slukket.

Alle paneler viser samme status:

Da alle paneler viser det samme, kan andre på klinikkerne se, hvornår klinikassistenten er færdig på en klinik. Har man et panel ved disken i receptionen kan man slukke for lyden her, det er så muligt at tilkalde hjælp fra de andre rum, f.eks. kan knap 9 være receptionen.

Installation . .

DENTCALL anlægget kan monteres af din normale Dental servicefirma.

En fælles strømforsyning tilsluttes en 230 volt stikkontakt og ringledningen..

9 paneler kan være tilsluttet hver sin ringeknap, maksimum 12 paneler i alt kan tilsluttes ringledningen. Ved store afstande kan to strømforsyninger tilsluttes.

Paneler og strømforsyningen er dækket af 2 års garanti.

Demonstration . .

Få en demonstration på din klinik.

Du kan ringe til din forhandler nu eller du kan udfylde kortet på næste side og få en demonstration på din klinik når det passer for dig.

Ved et besøg kan du sammen med din forhandler aftale hvor mange og hvor du vil have DENTCALL panelerne monteret.

Nye muligheder . . .

DENTCALL kalde anlægget giver dig nye muligheder for effektivitet og bedre oversigt over klinikken.