

Evt. kundens stempel her:

Garantikort

Producent:


DENT
Vestre Hovedgade 6C
DK - 7560 Hjern
Danmark

Forhandler:



Er varen dækket af garanti: JA NEJ skriv evt. panel ID nr.:

DENTCALL - KALDEANLÆG

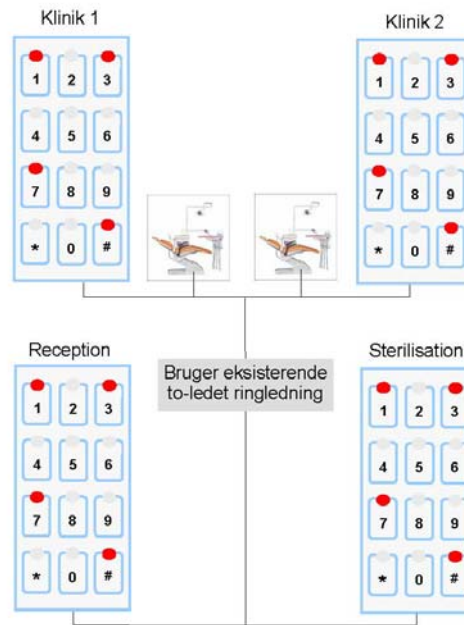

Producent:

DENT
Vestre Hovedgade 6C
DK - 7560 Hjern
Danmark


Telefon: +45 70 22 99 44
Fax: +45 97 70 70 03
E-mail: mail@dentcall.dk

DENTCALL er patent. 2009

DENTCALL

Kaldeanlæg

Brugsvejledning

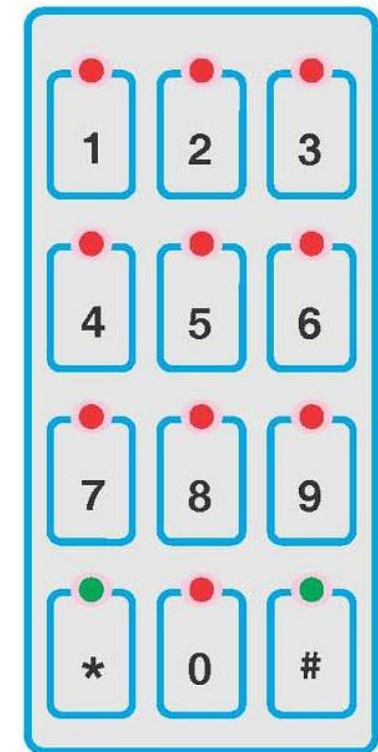

DENTCALL Dansk version 1.1

Betjening

Panelet kan betjenes ved at trykke på en af knapperne 1 til 9

Panelet kan tilsluttes kaldeknappen på unitten/fodkontrollen, panelet er så tilknyttet en af knapperne 1 til 9.

Alle panelerne viser samme status.

Tandlægen ønsker hjælp (kald):

Ved første tryk, tilhørende lampe ved knappen vil blinke og der høres en lyd i panelerne..

Klinikassistenten har set opkaldet: og er på vej til klinikken (svar):

Anden tryk på knappen, lampen vil nu lyse konstant. Det kan Tandlægen se på sit panel.

Klinikassistenten er færdigt på klinikken (afsluttet):

Tredje tryk, lampen slukkes.

Det er muligt at tænde og slukke lyden i de enkelte paneler, se næste side, Indstillinger.

Indstillinger

Panelet indstilles ved at trykke på en af knapperne * eller 0 eller #

Denne panel skal ikke give et lyd-signal når der sker et kald:

Klik på stjerneknappen * , nu er panelet lydløst, grøn * lampe lyser. Klik igen og lyden er igen tilsluttet, grøn * lampe slukket.

Denne panel ønskes slukket helt:

Tryk på 0 , panelet går i standby og rød 0 lampe lyser, alle andre lamper er slukket og der er ingen lyd fra panelet.

Jeg ønsker ikke at se andres status, kun mit eget nr. er aktivt:

Tryk på # , panelet viser kun status for eget nr.og grøn # lampe lyser. Tryk igen og alle kald vises igen på panelet.

Opsætning af panel ID nr.

Holdes # inden i mere end 3 sek. kan panel ID nr. ændres ved tryk på 1 til 9

Dette bruges ved tilslutning til en ringeknap eller unit.

Det kan også bruges hvis man kun ønsker status på sit eget panel.

Rengøring

Panelet kan rengøres med en fugtig klud og alm. rengøringsmidler.

Panelet må ikke komme i direkte vandkontakt

Garanti / rep.

Panelet og strømforsyningen er dækket af 2 års garanti.

Ved fejl på panel/strømforsyning vil disse blive ombyttet til at andet panel/strømforsyning.

Under garantien betaler kunden forsendelsen til producenten som så betaler forsendelsen tilbage til kunden.

Garantien er kun gyldigt ved korrekt montering og anvendelse.

Ved fejl montering og fejl uden for garantien sendes et nyt produkt til normal pris + forsendelsen.

Det kan være en fordel at oplyse Panel ID nr. f.eks. klinik nr. på garanti-kortet, da erstatningspanelet så kan være programmeret rigtig.

Kontakt forhandleren eller producenten ved fejl på anlægget.