

# DENTCALL


Kaldeanlæg

## Brugsvejledning



DENTCALL 2012

# DENTCALL - KALDEANLÆG

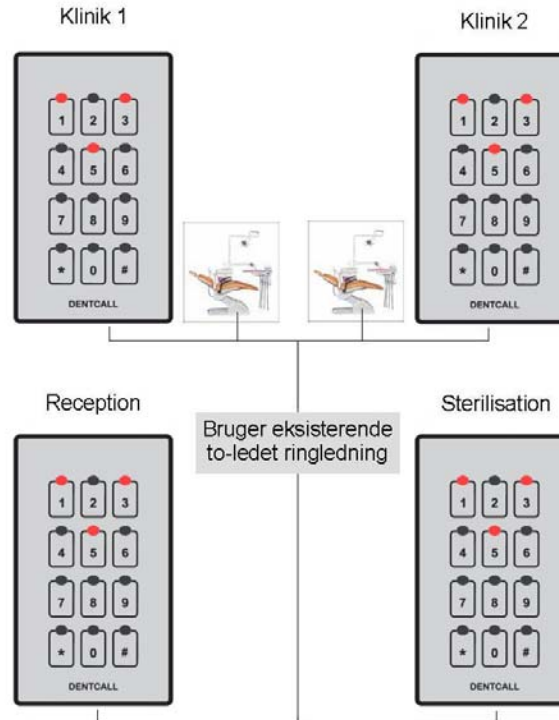

DENTCALL er patent. 2009

Garantikort

Forhandler:

Kunde:

Er varen dækket af garanti:  JA  NEJ skriv evt. panel ID nr.:

## Betjening

Panelet kan betjenes ved at trykke på en af knapperne 1 til 9

Panelet kan tilsluttes kaldeknappen på unitten/fodkontrollen, panelet er så tilknyttet en af knapperne 1 til 9.

Alle panelerne viser samme status.

### **Tandlægen ønsker hjælp (kald):**

Ved første tryk, tilhørende lampe ved knappen vil blinke og der høres en lyd i panelerne..

### **Klinikassistenten har set opkaldet: og er på vej til klinikken (svar):**

Anden tryk på knappen, lampen vil nu lyse konstant. Det kan Tandlægen se på sit panel.

### **Klinikassistenten er færdigt på klinikken (afsluttet):**

Tredje tryk, lampen slukkes.

Det er muligt at tænde og slukke lyden i de enkelte paneler, se næste side, Indstillinger.

## Indstillinger

Panelet indstilles ved at trykke på en af knapperne \* eller 0 eller #

### **Denne panel skal ikke give et lyd-signal når der sker et kald:**

Klik på stjerneknappen \* , nu er panelet lydløst, grøn \* lampe lyser. Klik igen og lyden er igen tilsluttet, grøn \* lampe slukket.

### **Denne panel ønskes slukket helt:**

Tryk på 0 , panelet går i standby og rød 0 lampe lyser, alle andre lamper er slukket og der er ingen lyd fra panelet.

### **Jeg ønsker ikke at se andres status, kun mit eget nr. er aktivt:**

Tryk på # , panelet viser kun status for eget nr.og grøn # lampe lyser. Tryk igen og alle kald vises igen på panelet.

### **Opsætning af panel ID nr.**

Holdes # inden i mere end 3 sek. kan panel ID nr. ændres ved tryk på 1 til 9

Dette bruges ved tilslutning til en ringeknap eller unit.

Det kan også bruges hvis man kun ønsker status på sit eget panel.

## Rengøring

Panelet kan rengøres med en fugtig klud og alm. rengøringsmidler.

Panelet må ikke komme i direkte vandkontakt

## Garanti / rep.

Panelet og strømforsyningen er dækket af 2 års garanti.

Ved fejl på panel/strømforsyning vil disse blive ombyttet til at andet panel/strømforsyning.

Under garantien betaler kunden forsendelsen til producenten som så betaler forsendelsen tilbage til kunden.

### **Garantien er kun gyldigt ved korrekt montering og anvendelse.**

Ved fejl montering og fejl uden for garantien sendes et nyt produkt til normal pris + forsendelsen.

Det kan være en fordel at oplyse Panel ID nr. f.eks. klinik nr. på garanti-kortet, da erstatningspanelet så kan være programmeret rigtig.

Kontakt forhandleren ved fejl på anlægget.